



*Simplicité d'usage
= efficacité*

CLEANISEPT® WIPES

Forte Maxi

Lingettes sans alcool

Dispositif médical de classe IIb

DESINFECTION RAPIDE DES SONDES D'ECHOGRAPHIE ENDOVAGINALES

ETAPE 1

Nettoyer la sonde avec un essuie-tout (élimination du gel).

ETAPE 2

Retirer la gaine protectrice.

ETAPE 3

Utilisation d'une lingette CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI pour réaliser la déterision.

ETAPE 4

Utilisation d'une seconde lingette CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI pour réaliser la désinfection.

ETAPE 5

Utiliser les lingettes CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI pour une désinfection de toutes surfaces pouvant entrer en contact avec la sonde.

ETAPE 6

Laisser agir 2 minutes sans sécher

ETAPE 7

Remettre une nouvelle gaine protectrice avant l'examen.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

VIRUCIDE EN 14476 / SPORICIDE EN 13704 / BACTÉRICIDE EN 16615

- Universelles et faciles à utiliser
- Détergentes et désinfectantes
- Validées par la plupart des fabricants de sondes (PHILIPS, SAMSUNG, SIEMENS, SONOACE, SONOSCAPE, TOSHIBA, ZONARE, GE HEALTHCARE, HITashi, MINDRay)
- Spectre d'activité rapide (2 minutes)
- Spécialement adaptées pour une désinfection de surfaces de dimensions intermédiaires

POUR TOUT COMPLEMENT D'INFORMATION :